

**N-IDEAL**

デジタルベビーテーブル

# M-5080LCD

タッチパネル式10.2インチTFTカラー液晶パネル採用



NAKAMURA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.


デジタルベビーテーブル

# M-5080LCD

● 体重・身長の測定、カウプ指数の自動計算・判定及びプリントアウトの機能を備えたテーブルです。



● TFTカラー液晶画面10.2インチは、身長・体重の測定値の表示が大きく見やすく、操作のし易いパネルです。

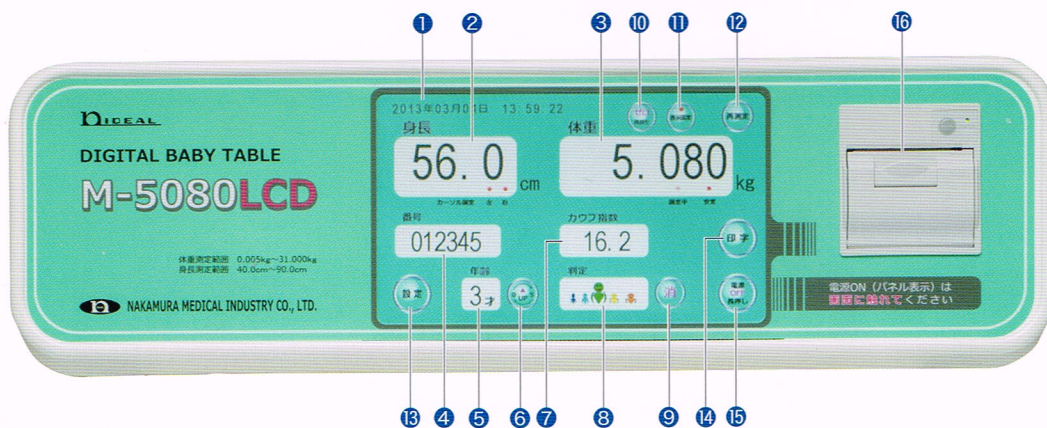


- ① 日付時刻表示欄
- ② 身長表示欄
- ③ 体重表示欄
- ④ 番号表示欄
- ⑤ 年齢表示欄
- ⑥ 年齢設定ボタン
- ⑦ カウプ指数表示欄
- ⑧ 判定表示欄
- ⑨ 判定表示ON/OFFボタン
- ⑩ ゼロ/風袋引ボタン
- ⑪ 表示固定設定ボタン
- ⑫ 再測定ボタン
- ⑬ 設定ボタン
- ⑭ 印字ボタン
- ⑮ 電源OFFボタン
- ⑯ プリンタ

赤ちゃんをテーブルに載せるだけで体重を自動測定し固定します。  
そのまま身長も測定できます。


### ① 体重の測定

赤ちゃんを載せるだけで体重の自動測定をします。表示固定設定により赤ちゃんが動いても、マイコン機能で正確な体重を測定します。

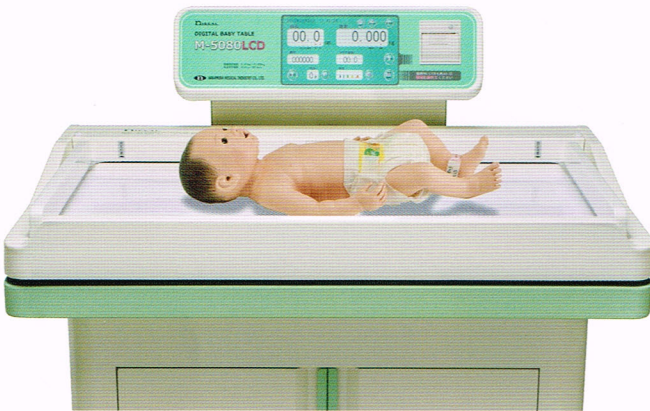

### ② 身長の測定


赤ちゃんを寝かせたまま、左右のカーソルを動かし身長を測定します。表示は固定されます。また、フットスイッチによる測定の強制固定もできます。

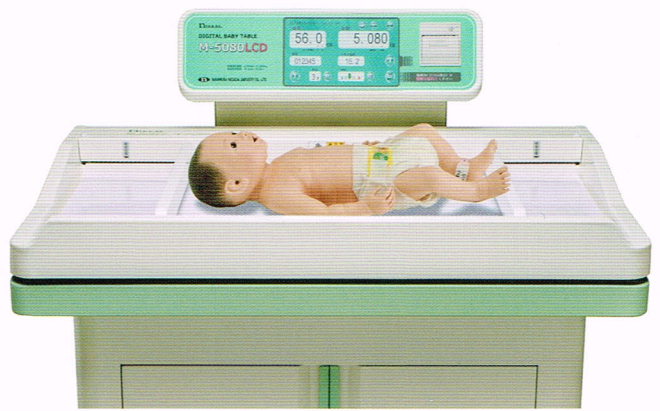

カウプ指数の計算及び判定を自動で行い表示します。

### ③ カウプ指数の計算と肥満度の自動判定

体重及び身長を測定すると自動的にカウプ指数を計算し、表示とともに判定表示欄の何れかのキャラクターを大きく表示します。肥満度の判定は、やせすぎ やせぎみ ふつう ふとりぎみ ふとりすぎ の5段階です。(判定表示のOFFもできます)

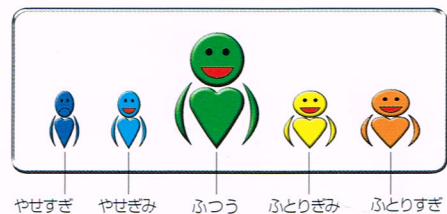

### ④ カウプ指数の判定表


年齢設定により算出されるカウプ指数は、年齢別に判定されます。

乳児 (3ヶ月以後)	2~3歳児	区分
14.5未満	13.5未満	やせすぎ
14.5以上 16.0未満	13.5以上 15.0未満	やせぎみ
16.0以上 18.0未満	15.0以上 17.0未満	ふつう
18.0以上 20.0未満	17.0以上 18.5未満	ふとりぎみ
20.0以上	18.5以上	ふとりすぎ

測定値の印字は、高速で静かなサーマルプリンタで、  
インクの交換は不要です。

### ⑤ 測定結果を素早くプリントアウト

印字ボタンを押せば測定結果や日時・年齢等を素早くプリントアウトし、記録の保管に役立ちます。サーマルプリンタなのでインクの交換はありません。

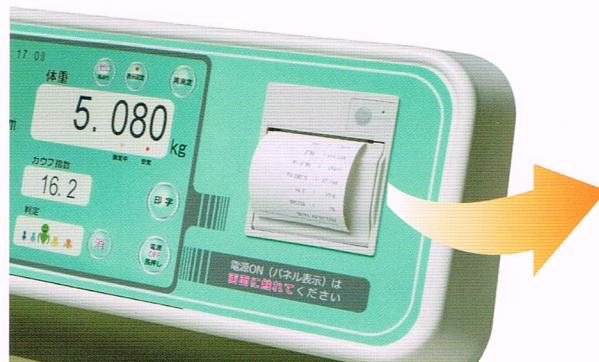

オプション

## 専用ウォーマー

赤ちゃんの計測や処置を、暖かい環境で行うことができます。

- 遠赤外線ヒーターにより、テーブル上の赤ちゃんを優しく暖めます。
- 温かさは出力コントロールダイヤルで自由に調節できます。
- ウォーマーの取り付けは簡単にできます。

### 仕様


ヒーター：遠赤外線 700W、手動出力コントロール方式  
照 明：20W 昼光色蛍光灯 2 本、防眩カバー付き  
電 源：AC100V、50 又は 60Hz 指定、消費電力 740VA  
重 量：約 20kg




### M-5080LCD 仕様

- 体重計 (計量器：内蔵分銅付重量級天秤/GP-32KR)  
ひょう量：31kg (計量器) 目盛：1g 使用範囲：5g~21kg  
測定方式：電磁平衡式  
風袋引き：ゼロ/風袋引きボタンによるワンタッチ式  
表示固定機能：測定値が安定した時点で表示を固定
- 身長計  
測定範囲：約40~90cm、1mm間隔  
校正機構：校正点80cm  
表示固定機能：左右のカーソルを個々に読み取り固定 (フットスイッチによる強制固定が可能)
- 表示部  
表示装置：10.2インチ タッチパネル式TFTカラー液晶/パネル  
表示内容：日付・時刻 身長 体重 番号 カップ指数 年齢 判定表示キャラクター  
カップ指数判定：5段階判定  
ランプ表示：表示固定 表示固定中 安定 左カーソル固定 右カーソル固定  
機能ボタン：年齢設定 ゼロ/風袋引き 表示固定設定 再測定 判定表示ON/OFF 設定 印字 電源OFF
- プリンタ  
印字方式：サーマルラインドット方式  
印字内容：日付・時刻 番号 年齢 体重(kg) 身長(cm) カップ指数 判定  
印字速度：Max. 90mm/秒 印字用紙：58mm x 18.5m
- 電 源：AC 100V、50/60Hz 消費電力20VA
- 寸法・重量：W104 x D73.5 x H114.5cm、約80kg
- 検 定：経済産業省検定合格品 (身長計は対象外)

### ●寸法図(単位:mm)

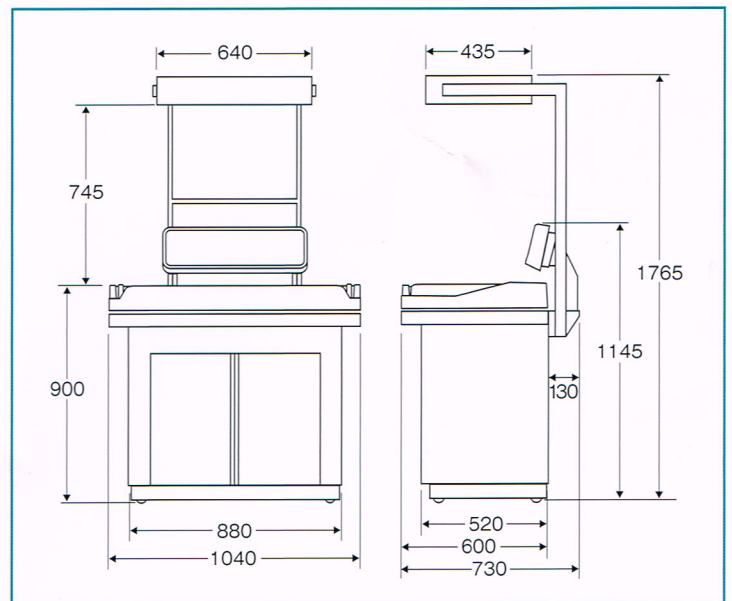

◎外観・仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

 中村医科工業株式会社

- 本 社…〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-23  
TEL03-3813-3486(代)
- 東海サービス…〒441-8019 愛知県豊橋市花田町越水153-3  
ステーション TEL0532-31-1549 (今村医科器械店)
- 大阪連絡所…〒541-0042 大阪府中央区今橋1-6-1  
TEL06-6228-3311 (新鋭工業株大阪支店)